

MI VARNISH no GC

Stiprina, piesātina un aizsargā ar vienu otas pieskārienu

JAUNUMS

Ārstē zobu hipersensitivitāti un nodrošina ilgstošu aizsardzību

- Vienkārša aplikācija, nav nepieciešama iepriekšēja virsmas sagatavošana vai profilakse
- Komfortabla un ātra procedūra, kas aizņem dažas minūtes
- Labi adhezējas pie aplikatora otiņas un viegli iepludināma grūti sasniedzamās vietās
- Efektīvi un vienmērīgi noklāj visas zoba virsmas
- MI Varnish sacietē, nonākot kontaktā ar ūdeni vai siekalām, nesalīp un nesarec
- Patīkama krēmīga tekstūra, komfortabls slāņa biežums pat pēc vairāku slāņu uzklāšanas
- Pieejamas 2 burvīgas garšas - piparmētra un zemene
- Neitrāla krāsa ar dabisku caurspīdīgumu



Viegli aplicēt

Unikāls, vienam pacientam paredzēts, iepakojums, to viegli atvērt un ērti piekļūt lakai

- Zoba virsmai jābūt tīrai un sausai. Profilakse nav nepieciešama
- Ar otiņu uzklājat plānu, vienmērīgu MI Varnish slāni uz zoba virsmām.

MI Varnish vienas devas (0,5 ml) pietiek pieauguša pacienta visiem zobiem!



- MI Varnish sacietē, nonākot kontaktā ar ūdeni vai siekalām.
- MI Varnish uz zobiem jānotur 4 stundas.
- Instruējiet pacientu šajā laikā izvairīties no cietiem, karstiem vai lipīgiem pārtikas produktiem, zobu tīrīšanas un diegošanas, atturēties no alkohola saturošiem produktiem (mutes skalojumiem, dzērieniem utml.)

Piezīme: Ja novērojama lakas noslāpošanās, pirms lietošanas samaisiet to ar vienreizlietojamo otiņu.



Indikācijas

Fluora lakas novērš hipersensitivitāti dažādās klīniskajās situācijās:



Cervikālie zobu rajoni



Pēc profesionālās mehāniskās zobu tīrīšanas



Okluzālā novalkāšanās



MIH

Papildu informāciju par MI Varnish var iegūt www.gceurope.com vai, zvanot GC konsultantei dr. Ievai Jelisejevai, tālr. 29405119, i.jelisejeva@nordic.gceurope.com

