

FujiCEM® Evolve

Jaunākās paaudzes sveķu modificēts stikla jonomēra cements

- Ļoti vienkāršs cementēšanas protokols
- Labi aizzīmogo malas
- Nav pēc cementēšanas jutīguma
- Ideāla konsistence
- Perfekti piemērots retentīvām preparācijām

Cirkonija cementēšanas risinājums
no stikla jonomēru tehnoloģijas līdera

Uzticama veikspēja un
patikami ērta lietošana

Indikācijas

GC FujiCEM™ Evolve ir īpaši piemērots:



Metāla un metālkeramikas
tiltu un kroņu cementēšanai



Cirkonija kroņu un tiltu
cementēšanai



Metāla un cirkonija sakņu
inleju un tapu cementēšanai

Iespējas un praktiskums

Stikla jonomēra cementa priekšrocības

- Nav pēc cementēšanas jutīguma
- **Tolerants pret mitrumu**
- **Viegla un ātra viena etapa cementēšanas tehnika**
- Darba laiks 2'15, cietēšanas laiks 4'30

Lietošanas ērtības

- Ergonomiska šļirces forma
- **Var samaisīt manuāli vai automātiski**
- Pieejami standarta un pagarinātie endodontiskie uzgalīši
- **Ideāla konsistence**
- **Liekā cementa ātrākai un ērtākai noņemšanai var izmantot īso 3 sek polimerizāciju**
- Universāla krāsa



Veiktspēja

- Ideāli piemērots metāla un cirkonija restaurāciju cementēšanai
- Perfekti piemērots retentīvām preparācijām
- Stiprāks saites spēks kā parastajiem stikla jonomēra, cinkkarboksilāta un cinkfosfāta cementiem.
- Labi redzams rentgena uzņēmumā, rentgenkontrastainība **258% Al.**



Cementēšanas soļi




1. Slīpēto zobu attīrīt ar pumeku un ūdeni vai smilšu strūklu. Nomazgāt, maigi nožāvēt, bet nepārzāvēt.

Manuāla samaiņšana




2. Uz papīra bloknota izspiest nepieciešamo cementa daudzumu. 10 sek. samaisīt abas pastas.

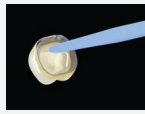

3. Cementu iepildīt kronī.



4. Restaurāciju novietot uz preparētā zoba.

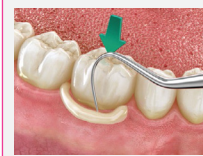


5. Ar instrumentu noņemt lieko cementu, kad tas ir ieguvis gumijas konsistenci.




6. Uzturiet mērenu spiedienu, līdz cements pilnībā sacietē. Cietēšanas laiks ir 4 min. 30 sec.

Automātiska samaiņšana

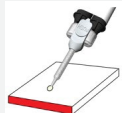

2. Pievienot šļircei uzgali. Izspiest cementu.

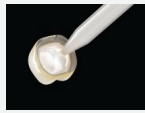

3. Cementu iepildīt kronī.




Vai: Nogaismojiet lieko cementu 3 sek., lai cements ātrāk iegūst gumijas konsistenci.

Klīniskais piemērs

1/ Situācija pirms



2/ Preparācija tiek notīrīta, cements tiek iepildīts restaurācijā

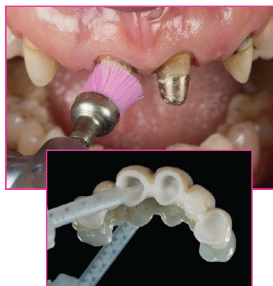

3/ Restaurācija novietota uz zoba



4/ Cementa pārpalikumu noņemšana



5/ Gala rezultāts



Mazais



FujiCEM Evolve 1-paka

- ✓ 1 šļirce (9,2gr/5 ml)
- ✓ 15 uzgališi

Parasti 103 EUR

Akcijas cena 82 EUR

Lielais



FujiCem Evolve 3-paka Automix

- ✓ 3 šļircēs (9,2gr/5 ml)
- ✓ 45 uzgališi

Parasti 263 EUR

Akcijas cena 210 EUR



FujiCem Evolve 3-paka Handmix

- ✓ 3 šļircēs (9,2gr/5 ml)
- ✓ Papīra bloknots manuālai cementa samaiņšanai

Parasti 224 EUR

Akcijas cena 179 EUR

Uzgališi



Standarta uzgališi

- ✓ 15 maisāmie uzgališi

Parasti 20 EUR

Akcijas cena 16 EUR



Pagarinātie endo uzgališi

- ✓ 15 endo uzgališi

Parasti 30 EUR

Akcijas cena 24 EUR

