

LIELISKS RISINĀJUMS SAREŽĢĪTAM UZDEVUMAM

PANAVIA™ Veneer LC



APGŪSTIET AUGSTAS ESTĒTIKAS CEMENTĒŠANU

Lai nodrošinātu veiksmīgu (vairāku) venīru cementēšanu, jaunais PANAVIA™ Veneer LC ir tieši tas, kas Jums ir nepieciešams! Tas piedāvā vienkāršu uzklāšanu, ilgu darba laiku (200 sekundes!) un ilgstošu estētiku. Visas šīs īpašības kopā ar Panavia izcilo adhēziju ir slavena kombinācija!

ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS

1

INOVATĪVA CIETĒŠANAS TEHNOLOĢIJA

PANAVIA™ V5 Tooth Primer nodrošina spēcīgu un izturīgu adhēzīvo virsmu, sacietējot tikai pēc saskares ar pastu. PANAVIA™ Veneer LC joprojām piedāvā ilgu darba laiku, kas ļauj vienlaikus cementēt pat vairākus venīrus. Gala rezultāts ir spēcīgs un izturīgs.

2

OPTIMIZĒTA APSTRĀDE

Cementa viskozitāte un tiksotropija ir optimizēta vieglai dozēšanai un novietošanai. *Tack-cure* jeb vienas sekundes sacietināšanas metode ļauj bez piepūles noņemt lieko materiālu.

3

AUGSTA ESTĒTIKA

Plānā materiāla kārtā un labā pulējamība ļauj izveidot gludas robežas. Četri ļoti stabili krāsu toni nodrošina ilgstošu estētiku. Atbilstošas pielaiķošanas jeb *try-in* pastas ļauj viegli izvēlēties pareizo toni.

INDIKĀCIJAS

Keramikas un kompozīta inleju, onleju un venīru cementēšana ar biezumu mazāku par 2mm.



INOVATĪVA CIETĒŠANAS TEHNOLOĢIJA

PANAVIA™ Veneer LC ir gaismā cietējoša sveķu cementa sistēma ar izcilu stabilitāti apkārtējā apgaismojumā, kas nodrošina 200 sekunžu* darbības laiku. Tas ļauj vienlaikus cementēt vairākus venīrus, nesacenšoties ar cementa cietēšanas laiku. Polimerizāciju var sākt tad, kad esat tai gatavs.

*Darba laiks apkārtējā apgaismojumā (8000 luksi): 200 sekundes.

200 SEKUNDES
APSTRĀDES LAIKS*

ČETRI IZCILI ESTĒTISKI TOŅI

Ar individuālām prasībām piemērotiem toņiem ir viegli sasniegt dabisku rezultātu.



Clear



Universal (A2)



White



Brown (A4)

PRODUKTU KLĀSTS

PRECES NUMURS	SATURS
PANAVIA™ Veneer LC Standard Kit	
#4500-EU Universal (A2)	PANAVIA™ Veneer LC Paste: 2.6g/1.5ml, PANAVIA™ V5 Try-in paste: 2.4g/1.8ml, PANAVIA™ V5 Tooth Primer: 2ml, CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus: 2ml, K-Etchant syringe: 3ml, Accessories: 5 applicator tips, 20 needle tips, 50 applicator brushes, 1 mixing dish
#4501-EU Clear	
PANAVIA™ Veneer LC Paste (Refill)	
#4505-EU Universal (A2)	PANAVIA™ Veneer LC Paste: 2.6g/1.5ml, 5 applicator tips
#4506-EU Clear	
#4507-EU Brown (A4)	
#4508-EU White	
PANAVIA™ V5 Try-in Paste (Refill)	
#3621-EU Universal (A2)	2.4g / 1.8ml
#3622-EU Clear	
#3623-EU Brown (A4)	
#3624-EU White	
Primers (Refill)	
#3635-EU PANAVIA™ V5 Tooth Primer	4ml
#3637-EU CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus	4ml
PANAVIA™ Veneer LC Accessories	
#4513-EU Applicator tip	20 applicator tips (16G)

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet kuraraynoritake.eu