

VISĀM RESTAURĀCIJAS PROCEDŪRĀM

KATANA™ Cleaner

Lietošanai mutes dobumā un ārpus tā



KATANA™ Cleaner

Noņem piesārņojumu, optimizējot adhēzijas procedūras.

Stiprināšanas izmēģinājuma laikā restaurāciju var piesārņot proteīni, kas vājina piesaisti. Produkta KATANA™ Cleaner sastāvā esošais MDP sāls nodrošina efektīvu tīrīšanu.

Pretstatā citiem tīrīšanas līdzekļiem KATANA™ Cleaner pH vērtība ir 4,5¹ un to var izmantot arī mutes dobumā, ne tikai ārpus tā. Tā ir ērta iespēja optimizēt piesaisti, tostarp arī cementēšanas procedūrās.

1. Noteikšanas metode: JIS Z 8802:2011

PLAŠS INDIKĀCIJU DIAPAZONS: LIETOŠANAI MUTES DOBUMĀ UN ĀRPUS TĀ

Produktam KATANA™ Cleaner ir neliela pH vērtība jeb 4,5, tāpēc to var lietot gan mutes dobumā, gan ārpus tā, un tas ir universāls tīrīšanas līdzeklis zobu struktūrām un protēzēm.



Mutes dobumā:

Kavitāte, balsta zobs, saknes kanāls



Protēzes:

Keramika (cirkoniji, litija disilikāts, zobārstniecības porcelāns)


Materiāli uz sveķu bāzes (CAD/CAM kroniši, sveķu kompozītmateriāls)

Metāls (dārgmetāls/sakausējumi, kas nav dārgmetāli)


Tapas (stiklšķiedras tapas, metāla tapas)

ĒRTA UN ĀTRA PROCEDŪRA

Ieberzējiet, noskalojiet un nožāvējiet. Ar to pietiek, lai optimizētu adhēzijas procedūru. Atšķirībā no citiem tīrītājiem, kuri ilgāk jāieberzē virsmā un kurus var lietot tikai ārpus mutes dobuma, produkta **KATANA™ Cleaner** uzklāšanai nepieciešamas tikai 10 sekundes, un to var lietot gan mutes dobumā, gan ārpus tā.

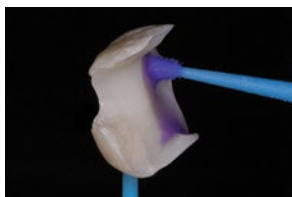

Uzklājiet un ieberzējiet līdzekli KATANA™ Cleaner vismaz 10 sekundes. Tas attiecas gan uz protēzi, gan uz substrātu mutes dobumā.

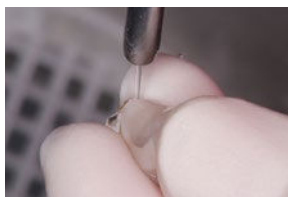

Noskalojiet un nožāvējiet.



Cementējiet restaurāciju atbilstoši ražotāja norādījumiem.



Attēli saņemti no
Dr. Shoji Kato

TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻU SALĪDZINĀJUMS*

	KATANA™ CLEANER	IVOCLEAN** (IVOCLAR VIVADENT)	ZIRCLEAN** (BISCO)
Lietošana mutes dobumā uz zoba struktūras	Jā	Nē	Nē
Lietošana mutes dobumā uz implantu balsta zobiem	Jā	Nē	Nē
Lietošana ārpus mutes dobuma	Jā	Jā	Jā
Aktīvā sastāvdaļa	MPD sāls (virsmaaktīvā viela)	Nātrija hidroksīds	Kālija hidroksīds
pH	4,5	13-13,5	13
Lietošanas laiks	10 sekundes	20 sekundes	20 sekundes
Apstrāde	Nav nepieciešama sakratišana	Jāsakrata pirms lietošanas	Nav nepieciešama sakratišana

* Saskaņā ar lietošanas instrukcijām un oficiālajiem dokumentiem

** Nav uzņēmuma Kuraray Noritake Dental Inc. preču zīme

PRODUKTU SORTIMENTS

ARTIKULA NR.	PRODUKTA APRAKSTS
#3970-EU	KATANA™ Cleaner 4,0ml
#3971-EU	KATANA™ Cleaner Trial 1,0ml

Plašāka informācija ir pieejama vietnē kuraraynoritake.eu/lv/katana-cleaner