

PANAVIA™ V5



VIENS CEMENTS. VSIEM LIETOŠANAS VEIDIEM. VIENA AUGSTĀKĀS KVALITĀTES PROCEDŪRA.

PANAVIA™ V5 cements ir paredzēts visiem lietošanas veidiem neatkarīgi no indikācijas vai saistāmā materiāla! PANAVIA™ V5 atzītā un prognozējamā procedūra ir pārsteidzoši vienkārša. Viena cementēšanas procedūra; speciālais PANAVIA™ V5 zobu praimeris zobu audu iepriekšējai apstrādei un CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS restaurāciju praimēšanai.

PANAVIA™ V5 ir visstiprākais cements! Turklāt tas ir pieejams vismaz piecās estētiski noformētās krāsās. Amīnus nesaturošā pasta pastiprina PANAVIA™ V5 izturību un krāsu stabilitāti.

PANAVIA™ V5 NOSLĒPUMS

Kuraray Noritake Dental oriģinālais, augstākās tīrības MPD monomērs nodrošina ne tikai visizturīgāko savienojumu ar hidroksiapatītu (HAp), bet arī cieši piesaistās metāliem un cirkonijam. PANAVIA™ V5 zobu praimera un CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS MPD monomērs nodrošina izcili izturīgu savienojumu. Šis ir viens no PANAVIA™ V5 izcilā snieguma noslēpumiem!



LIETOŠANAS VEIDI

Lai cementētu:

- Kroņus, tiltus, inlejas un onlejas;
- Venīrus;
- Pielīmējamus tiltus un šinas;
- Prostētiskās implantu balstu un struktūru restaurācijas;
- Tapas un stumbrus;
- Amalgamu saistviela

ĪPAŠĪBAS

- Divkāršā cietināšana:
- automix šļirce;
- 5 estētiskas krāsas;
- fluorīda padeve;
- nesatur amīnus;
- viegli notīrāma liekā viela;
- derīguma termiņš 3 gadi

PROGNOZĒJAMAS PROCEDŪRAS¹

Zobārsts izmanto vienu un to pašu skaidri noteikto procedūru visām restaurācijām, materiāliem un indikācijām.

1. Uzklāj CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS uz restaurācijas.
2. Uzklāj PANAVIA™ V5 zobu praimeris uz zobu audiem.
3. Uzklāj PANAVIA™ V5 uz restaurācijas un tad nofiksē vajadzīgajā vietā.



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS ir universāls iepriekšējas apstrādes praimeris savienošanai ar keramiku, hibrīdkeramiku, kompozītiem un metālu.



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER

PANAVIA™ V5 zobu praimeris piesaista materiālu zobu audiem un nodrošina pastas cietēšanu. Vispirms oriģinālais MDP monomērs sasaista materiālu ar emalju un dentīnu. Tiklīdz PANAVIA™ V5 zobu praimeris saskaras ar cementa pastu, cietēšanas process nekavējoties paātrinās (to sauc arī par "Touch-Cure" — cietēšana ar pieskārienu). Šis process nodrošina lielisku pastas polimerizāciju, kā arī ļoti spēcīgu materiālu sasaisti.

PIECAS ESTĒTISKAS KRĀSAS²

Divkārša apstrāde ar gaismu:

Universāla (A2) Caurspīdīga Brūna (A4)

Balta

Automātiska apstrāde ar gaismu:

Necaurredzama



¹ Lietošanas pamācībā īsumā sniegti norādījumi par pareizu iepriekšēju apstrādi un nepieciešamo gaismas intensitāti.

² Reālās krāsas var atšķirties no drukā redzamajām.

PANAVIA™ V5



PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA

PRECES NUMURS	IZSTRĀDĀJUMA NOSAUKUMS	IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
#3604-EU	PANAVIA™ V5, Sākuma komplekts — universāls (A2)	1 automix šļirce ar 2,4 ml pastas, 1 PANAVIA™ V5 zobu praimeris 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2,0 ml, 10 jaukšanas uzgaļi, 50 otiņas uzklāšanai (smalkas), 1 trauks jaukšanai.
#3605-EU	PANAVIA™ V5, Sākuma komplekts — caurspīdīgs	1 automix šļirce ar 2,4 ml pastas, 1 PANAVIA™ V5 zobu praimeris 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2,0 ml, 10 jaukšanas uzgaļi, 50 otiņas uzklāšanai (smalkas), 1 trauks jaukšanai.
#3600-EU	PANAVIA™ V5, Profesionālais komplekts	1 automix šļirce katrai krāsai ar 2,4 ml pastas un 1 pasta izmēģināšanai katrai krāsai 1,8 ml (krāsas: universāla (A2), caurspīdīga, brūna (A4), balta, necaurredzama), 1 PANAVIA™ V5 zobu praimeris 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2,0 ml, 1 K-ETCHANT šļirce 3,0 ml, 30 jaukšanas uzgaļi, 10 endo uzgaļi, 50 otiņas uzklāšanai (smalkas), 1 trauks jaukšanai, 20 adatas.
#3601-EU	PANAVIA™ V5, Standarta komplekts — universāls (A2)	1 automix šļirce ar 4,6 ml pastas, 1 PANAVIA™ V5 zobu praimeris 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2,0 ml, 1 K-ETCHANT šļirce 3,0 ml, 15 jaukšanas uzgaļi, 5 endo uzgaļi, 50 otiņas uzklāšanai (smalkas), 1 trauks jaukšanai, 20 adatas.
#3602-EU	PANAVIA™ V5, Standarta komplekts — caurspīdīgs	1 automix šļirce ar 4,6 ml pastas, 1 PANAVIA™ V5 zobu praimeris 2,0 ml, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2,0 ml, 1 K-ETCHANT šļirce 3,0 ml, 15 jaukšanas uzgaļi, 5 endo uzgaļi, 50 otiņas uzklāšanai (smalkas), 1 trauks jaukšanai, 20 adatas.
#3611-EU	PANAVIA™ V5, Pasta atkārtotai uzpildei — universāla (A2)	1 automix šļirce 4,6 ml, 20 jaukšanas uzgaļi
#3612-EU	PANAVIA™ V5, Pasta atkārtotai uzpildei — caurspīdīga	1 automix šļirce 4,6 ml, 20 jaukšanas uzgaļi
#3613-EU	PANAVIA™ V5, pasta atkārtotai uzpildei — brūna (A4)	1 automix šļirce 4,6 ml, 20 jaukšanas uzgaļi
#3614-EU	PANAVIA™ V5, pasta atkārtotai uzpildei — balta	1 automix šļirce 4,6 ml, 20 jaukšanas uzgaļi
#3615-EU	PANAVIA™ V5, pasta atkārtotai uzpildei — necaurredzama	1 automix šļirce 4,6 ml, 20 jaukšanas uzgaļi
#3621-EU	PANAVIA™ V5, pasta izmēģināšanai — universāla (A2)	1 šļirce 1,8 ml
#3622-EU	PANAVIA™ V5, pasta izmēģināšanai — caurspīdīga	1 šļirce 1,8 ml
#3623-EU	PANAVIA™ V5, pasta izmēģināšanai — brūna (A4)	1 šļirce 1,8 ml
#3624-EU	PANAVIA™ V5, pasta izmēģināšanai — balta	1 šļirce 1,8 ml
#3625-EU	PANAVIA™ V5, pasta izmēģināšanai — necaurredzama	1 šļirce 1,8 ml
#3626-EU	PANAVIA™ V5 jaukšanas uzgaļi (20 gab.)	20 jaukšanas uzgaļi
#3629-EU	PANAVIA™ V5 endo uzgaļi (20 gab.)	20 endo uzgaļi
#3635-EU	PANAVIA™ V5 zobu praimeris 4 ml	1 pudele, 4 ml
#3637-EU	CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS	1 pudele, 4 ml