

Teicami kontakti garantēti

Garrison
Dental Solutions

3D Fusion™ Sekcionālā matricu sistēma



Garrison sekcionālo matricu sistēma četrpadsmito reizi pēc kārtas ieguvusi Dental Advisor balvu kategorijā "Labākā sekcionālā matrica"!



The Dental Advisor – Labākā sekcionālā matricu sistēma 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā, kā arī Editors' Choice.



Zilais Composi-Tight® 3D Fusion™ gredzens – tagad vēl ērtāk atverams

Jaunā gredzena forma nodrošina vēl labāku pielāgošanos marginālai anatomijai, pateicoties mīkstajiem silikona uzgaļiem. Lieliski piemērots īsiem un nepareizi novietotiem zobiem. Var novietot arī virs koferdamas klemmes vai starp kanīnu un pirmo premolāru. (Ref. FX400, iepakojumā 2 gb.)



Oranžais Composi-Tight® 3D Fusion™ gredzens – tagad ar noturošiem uzgaļiem

Ultra-Grip™ retencijas uzgaļi novērš gredzena slīdēšanu un nodrošina stabilitāti visās situācijās. Uzlabotā forma atvieglo gredzena atvēršanu un novietošanu, īpaši labi turas uz lielajiem molāriem. (Ref. FX500, iepakojumā 2 gb.)



Jaunais zaļais Composi-Tight® 3D Fusion™ gredzens – platām preparācijām

Ideāli piemērots platām apmēram spraugām – arī gadījumos, kad trūkst kāds zoba paugurs. Platie silikona uzgaļi novērš matricas lentes iespiešanos kavitātē. (Ref. FX600, iepakojumā 2 gb.)



Artikula Nr.	Apraksts
--------------	----------

FX400	3D Fusion™ zils gredzens (īss), 2 gab./iekāojumā
FX500	3D Fusion™ oranžs gredzens (garš), 2 gab./iekāojumā
FX600	3D Fusion™ zaļš gredzens (plats), 2 gab./iekāojumā
FXR01	3D Fusion™ gredzena komplekts (1× zils, 1× oranžs, 1× zaļš)
FXP01	Uzlabots gredzena maigles no rūdīta nerūsējošā tērauda


Klīniskais padoms

Ja interproksimālais kontakts ir pārāk ciešs, lai ievietotu matricu restaurācijai, iepriekš ievieto zilo gredzenu un nogaidi aptuveni 20 sekundes, līdz kontakts nedaudz atveras. Pēc tam izņem gredzenu un ievieto matricu.

Fusion™ Anterior

III un IV klases restaurācijām

Fusion™ Anterior matricu sistēma no Garrison® piedāvā materiālus un tehniku, lai ar pārliecību veiktu dažādu veidu priekšzobu restaurācijas.

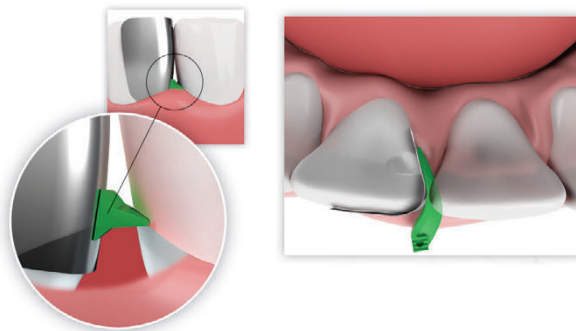

Priekšzobu ķīliņi

Fusion™ Anterior						
II klases kavitātēm						
Part. Nr.	ANYL	ANBL	ANOR	ANGR	ANK4	ANK4-M
Apraksts	Ļoti mazi, dzelteni	Mazi, zili	Vidēji, oranži	Lieli, zaļi	Ķīliņu komplekts, 400 gab. – katra krāsa 100 gab. 4 izmēros	Ķīliņu komplekts, 200 gab. – katra krāsa 50 gab. 4 izmēros
Daudzums	100	100	100	100	400	200

Fusion™ Anterior Matrix System

Fusion™ Anterior Matrix piedāvā virkni uzlabojumu, kas palīdz ātri un pārliecinoši atjaunot ideālu interproksimālo anatomiju.



Fusion Anterior matricas


Veids	Artikuls	Standarta iepakojums	Artikuls	Lielais iepakojums
Īsas	AN100-M	50 gab.	AN100	100 gab.
Garas	AN200-M	50 gab.	AN200	100 gab.

- Tikai 0.0015" – ievērojami plānākas par lentītēm, kas nodrošina labāku interproksimālo kontaktu.
- Stingrs nerūsējošais tērauds saglabā formu gan ievietošanas laikā, gan ievietojot kompozītu kavitātē.
- Viegli ievietojamas sulkusā dziļākiem restaurācijas gadījumiem.
- Ideāls anatomiskais izliekums gan gingivāli-incizālā, gan bukāli-lingvālā virzienā.
- Daudz efektīvākas nekā lentītes lielu vai dziļu kariozu bojājumu atjaunošanā.



Malas celšanas matricas nodrošina optimālu piekļaušanos smaganu malai un kontūru dziļi novietotām marginālajām zonām.

Tās augstums ir samazināts, lai veicinātu uzlabotu piekļaušanos dziļām zonām.

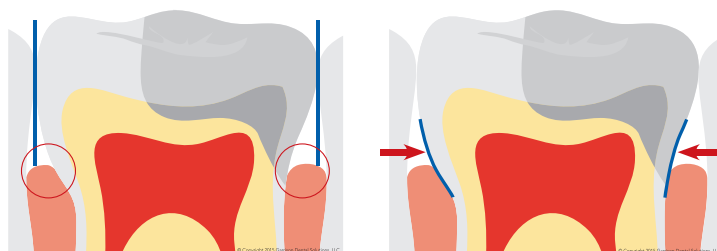

Klasiska Tofflemire matrica

Malas celšanas matrica



Dr. Roberts Rozenfelds (Vestvuda, Ņūdžersija)
izmanto malas celšanas matricu
no Garrison® Dental Solutions

SlickBands™



Klīniskie gadījumi



1.attēls: Amalgamas izņemšana;
kariozais process ir izplatījies dziļi
subgingivāli gan mesijāli, gan distāli.



2. attēls: Praimera un saites uzklāšana,
pakāpeniski ievieto restaurāciju materiālu.



3. attēls: Malas celšanas matricas
un ķīliša ievietošana.



4. attēls: Malas celšanas matricas noņemšana,
pēc tam sekcionālās matricas, ķīliša un
separācijas gredzena ievietošana
mesijālajā pusē.



5. attēls: Malas celšanas matricas noņemšana,
pēc tam sekcionālās matricas, ķīliša un
separācijas gredzena ievietošana
mesijālajā pusē.




6. attēls: Gatava restaurācija.



Dr. Klarena Tama (Oklenda, Jaunzēlande)
izmanto Fusion™ priekšzobu matricu sistēmu
no Garrison® Dental Solutions.

Fusion™ Anterior

III un IV klases restaurācijām

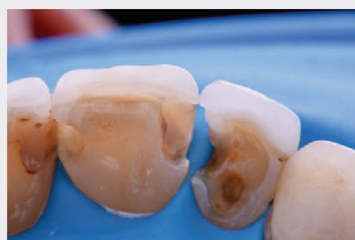

1. attēls: Sākotnējā situācija.



2. attēls: Fusion™ priekšzobu matricas un
Fusion™ izliekta priekšzobu starpzobu ķīliša
ievietošana nodrošina minimālu restaurācijas
materiāla pārkari.



3. un 4. attēls: Abi restaurāciju
veidošana.



5. attēls: Gatava restaurācija.

Garrison
Dental Solutions