

FujiCEM® Evolve



Jaunākās paaudzes sveķu modificēts stikla jonomēra cements

- Ļoti vienkāršs cementēšanas protokols
- Labi aizzīmogo malas
- Nav pēccementēšanas jutīguma
- Ideāla konsistence
- Perfekti piemērots retentīvām preparācijām

Cirkonija cementēšanas risinājums
no stikla jonomēru tehnoloģijas līdera

**Uzticama veikspēja un
patikami ērta lietošana**

Indikācijas

GC FujiCEM™ Evolve ir īpaši piemērots:



Metāla un metālkeramikas
tiltu un kroņu cementēšanai



Cirkonija kroņu un tiltu
cementēšanai



Metāla un cirkonija sakņu
inleju un tapu cementēšanai

Iespējas un praktiskums

Stikla jonomēra cementa priekšrocības

- Nav pēccementēšanas jutīguma
- **Tolerants pret mitrumu**
- **Viegla un ātra viena etapa cementēšanas tehnika**
- Darba laiks 2'15, cietēšanas laiks 4'30

Lietošanas ērtības

- Ergonomiska šļirces forma
- **Var samaisīt manuāli vai automātiski**
- Pieejami standarta un pagarinātie endodontiskie uzgaļi
- **Ideāla konsistence**
- **Liekā cementa ātrākai un ērtākai noņemšanai var izmantot īso 3 sek polimerizāciju**
- Universāla krāsa

Veikspēja

- Ideāli piemērots metāla un cirkonija restaurāciju cementēšanai
- Perfekti piemērots retentīvām preparācijām
- Stiprāks saites spēks kā parastajiem stikla jonomēra, cinkkarboksilāta un cinkfosfāta cementiem.
- Labi redzams rentgena uzņēmumā, rentgenkontrastainība **258% Al.**



Cementēšanas soli

1. Slipēto zobu attīrīt ar pumeku un ūdeni vai smilšu strūklu. Nomazgāt, maigi nožāvēt, bet nepāržāvēt.	Manuāla samaisīšana 2. Uz papīra bloknota izspiest nepieciešamo cementa daudzumu. 10 sek. samaisīt abas pastas. 3. Cementu iepildīt kronī. Automātiska samaisīšana 2. Pievienot šļircei uzgali. Izspiest cementu. 3. Cementu iepildīt kronī.	4. Restaurāciju novietot uz preparētā zoba.	5. Ar instrumentu noņemt lieko cementu, kad tas ir ieguvis gumijas konsistenci. Vai: Nogaismojiet lieko cementu 3 sek., lai cements ātrāk iegūst gumijas konsistenci.	6. Uzturiet mērenu spiedienu, līdz cements pilnībā sacietē. Cietēšanas laiks ir 4 min. 30 sec.
--	--	--	---	---

Klīniskais piemērs

1/ Situācija pirms	2/ Preparācija tiek notīrīta, cements tiek iepildīts restaurācijā	3/ Restaurācija novietota uz zoba	4/ Cementa pārpalikumu noņemšana	5/ Gala rezultāts
---------------------------	--	--	---	--------------------------

Mazais

Lielais



FujiCEM Evolve 1-paka
 ✓ 1 šļirce (9,2gr/5 ml)
 ✓ 15 uzgališi
 Parasti 103 EUR
Akcijas cena 82 EUR



FujiCEM Evolve 3-paka Automix
 ✓ 3 šļircēs (9,2gr/5 ml)
 ✓ 45 uzgališi
 Parasti 263 EUR
Akcijas cena 210 EUR



FujiCEM Evolve 3-paka Handmix
 ✓ 3 šļircēs (9,2gr/5 ml)
 ✓ Papīra bloknots manuālai cementa samaisīšanai
 Parasti 224 EUR
Akcijas cena 179 EUR

Uzgališi



Standarta uzgališi
 ✓ 15 maisāmie uzgališi
 Parasti 20 EUR
Akcijas cena 16 EUR



Pagarinātie endo uzgališi
 ✓ 15 endo uzgališi
 Parasti 30 EUR
Akcijas cena 24 EUR

