



TEICAMIEM KONTAKTIEM.

Matricas un
gredzeni



Garrison
Dental Solutions

 **polydentia**
swiss manufacture 

 **ULTRADENT**
PRODUCTS, INC.

 **SIMPLEE**[®]



unica proximal

in cooperation with
STYLE ITALIANO™

jaunums!

fokuss uz proksimālo zonu
fokuss uz formu

Priekšrocības

Precīza kontūru atveide labiāli,
palatenāli un proksimāli

Universāla forma un kontūra augšžokļa un
apakšžokļa mežiālajiem un distālajiem zobiem,
kas būtiski vienkāršo un paātrina priekšzobu
restaurāciju

Nodrošina labu redzamību un piekļuvi darba
laukam pat tad, ja vienlaikus ievietotas
vairākas matricas

Pašnostabilizējošas

Garāki kakliņa zonas pagarinājumi
nekā sānu zobu sekcionālajām
matricām

Pieejamas divos izmēros, lai nodrošinātu
optimālu piekļaušanos dažādām incīzīvu
morfoloģijām



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



anterior
matricas

jaunums!

unica proximal

anterior matricas

Fokuss uz proksimālo zonu
Fokuss uz formu

Atsauksme



"Lai nodrošinātu paredzamību tiešajās kompozīta restaurācijās priekšzobu zonā, mums nepieciešams risinājums, kas ir gudrs, vienkāršs, unikāls un ekonomiski izdevīgs – īpaši attiecībā uz kontūras un restaurācijas ārējās formas veidošanu. Unica Proximal atrisina priekšējo matricu problēmas, nodrošinot vieglu matricu ievietošanu, pašnostabilizēšanos bez ķīliņu lietošanas un iespēju prognozēt ārējo kontūru, jo tā lieliski pieguļ restaurētajiem priekšzobiem bez lieka materiāla labiāli un palatēnāli. Tā ir ideāli piemērota III un IV klases restaurācijām, diastēmas slēgšanai, formas korekcijai un kompozīta venīriem. Unica Proximal ir gudrs risinājums ikdienas tiešajām estētiskajām un funkcionālajām priekšzobu restaurācijām."

Dr. Osama Shaalan,
Palestīna




Courtesy of Dr. Osama Shaalan



for more
information

SWISS
MADE

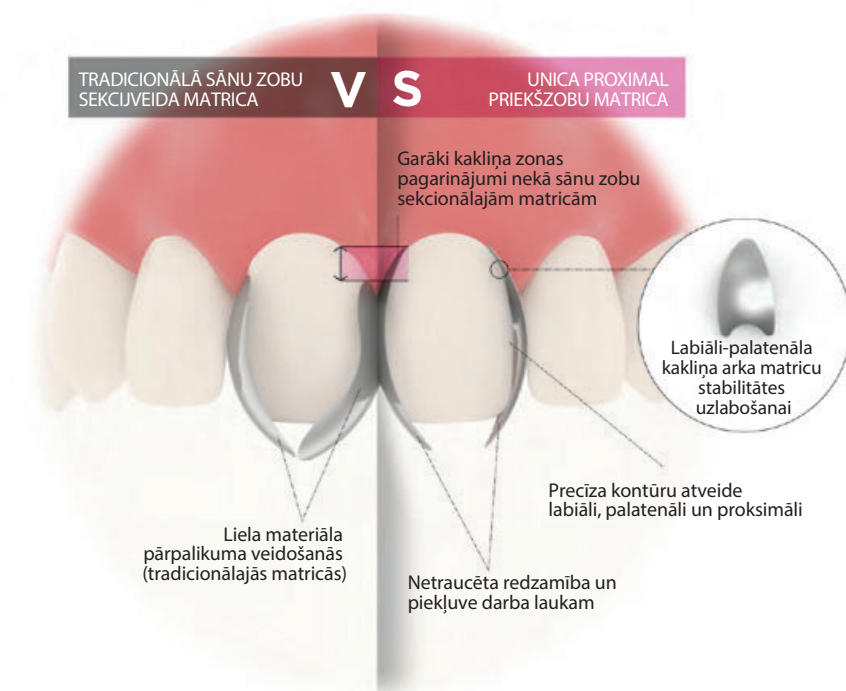

Unica Proximal nodrošina uzlabotu kontroli priekšzobu restaurācijās. Šī jaunā priekšzobu matrica novērš nepieciešamību griezt vai pārveidot esošās sānu zobu sekcionālās matricas un piedāvā formu, kas nodrošina vienkāršu un drošu adaptāciju un piekļaušanos priekšzobu zonā, vienlaikus uzlabojot redzamību un piekļuvi darba laukam.



Apskati
video

unica
proximal



unica
proximal
deep

Unica Proximal nerūsējošā tērauda matricas ir 0,03 mm biezas un pieejamas divās formās, kas veidotas, lai atbilstu priekšzobu kontūrām labiāli, palatēnāli un proksimāli. Unica Proximal matricas ir īpaši piemērotas priekšzobu restaurācijām, kurās iesaistītas proksimālās sienas (III un IV klases restaurācijas, pegveida laterālie incīzīvi, diastēmu slēgšana, daļēji un pilnīgi venīri). Unica Proximal Deep versija ir paredzēta periodonta lietojumiem ar plakanām papildām. Viegli ievietojamā labiāli-palatēnālā kakliņa arka paredzēta matricu nostiprināšanai starp papildu un zobu subgingivāli, lai pēc ievietošanas uzlabotu stabilitāti. Matricas nostiprināšanai var izmantot ķīlīti, taču tas nav obligāti. Forma izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu piekļaušanos priekšzobu kontūrām, vienlaikus piedāvājot labāku redzamību un piekļuvi darba laukam nekā citas alternatīvas, piemēram, sānu zobu sekcionālajām matricām.



Unica Proximal anterior matricas – REF 6913
standarts 0.03mm, 100 gab.



Unica Proximal anterior matricas – REF 6914
standarts 0.03mm, 50 gab.



Unica Proximal deep anterior matricas – REF 6952
dziļas 0.03mm, 100 gab.



Unica Proximal deep anterior matricas – REF 6953
dziļas 0.03mm, 50 gab.



unica

anterior

developed with
STYLE ITALIANO™

Daudzpusīga sistēma.
Nodrošina visu
priekšzobu restaurāciju

Starpzobu un kakliņa zonu
atjaunošana ar vienu
matricu

Pareiza starpzobu
kontaktzonas restaurācija,
pateicoties anatomiski
veidotām matricām

Vienkārša piekļuve
kakliņa zonai: augsta
restaurācijas un
gingivālās retrakcijas
paredzamība

Viens
risinājums
priekšzobu
restaurācijām

jaunums!

Unica
minideep
anterior



polydentia
swiss manufacture 

matricas
sistēma

Unica anterior

Polydentia klasika priekšzobu restaurācijām



- Īpaši plāns (0,03 mm) nerūsējošais tērauds ciešai kontaktzonai
- Pozicionēšanas "spārniņi" ērtākai fiksācijai
- Veidots atbilstoši anatomiski precīzām restaurācijām

Unica anterior ieteicams lietot:

- Augšējiem centrālajiem incīzīviem
- Augšējiem laterālajiem incīzīviem
- Kanīniem



jaunums!

Unica minideep anterior

vēl labāka adaptācija mazākiem priekšzobiem



- Īpaši plāns (0,03 mm) nerūsējošais tērauds ciešām kontaktvirsām
- Uzlabota adaptācija kakliņa zonā uz apakšzokļa incīzīviem un sānu zobiem
- Pozicionēšanas "spārniņi" ērtākai fiksācijai
- Elastīgs materiāls vēl labākai pielāgojamībai
- Anatomiski veidots precīzai restaurācijai, ievērojot dabisko zobu anatomiju

Unica minideep anterior ieteicams lietot:

- Augšējiem un apakšējiem laterālajiem incīzīviem
- Apakšējiem centrālajiem incīzīviem
- Koniskiem zobiem
- Trīsstūrveida formas zobiem
- Zobiem ar šauru kakliņa diametru



Klīniskie gadījumi ar Unica anterior un Unica minideep anterior

III klases restaurācija | Dr. Giuseppe Chiodera – Itālija



IV klases restaurācija | Dr. Dan Lazar – Rumānija



V klases restaurācija | Dr. Giuseppe Chiodera – Itālija



Forma korekcija | Dr. Carlos Fernández Villares – Spānija



Kompozīta venīri | Dr. Jordi Manauta, DDS – Itālija



Diastēmas slēgšana uz centrālajiem incīzīviem un pegveida laterālo incīzīvu restaurācija

Dr. Osama Shaalan – Palestīna




“Unica anterior” matricu sistēma ļauj vienlaicīgi atjaunot gan proksimālās, gan kakliņa zonas malas.

myQuickmat Prime

jaunums!

Esi
flamingo
baložu
barā

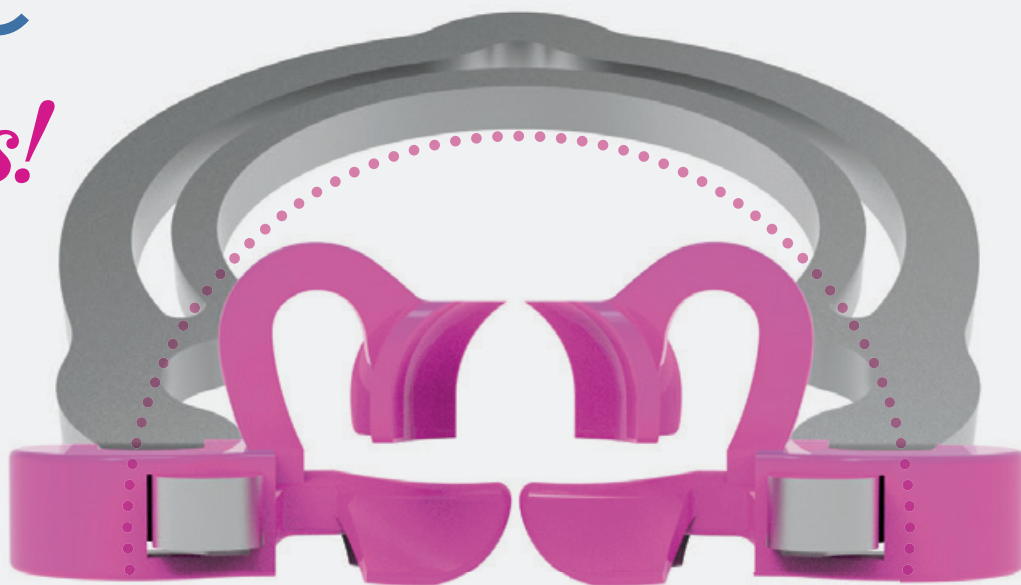

Priekšrocības

Vienkāršota sistēma sānu zobiem,
kas samazinās krēslā pavadīto laiku

Restaurācijas pamatelementi: viens
gredzens ar integrētiem ķīlīšiem un
viena anatomiska matrica
(atsevišķs ķīlītis nav nepieciešams)

Pašcentrējoša ķīlīša forma – dabiski
vadīta ievietošana, nodrošinot
efektīvu blakus esošo zobu
separāciju ar optimālu matricas
adaptāciju un cervikālo pieslēgumu

Gredzena stabilitāte:
novērš gredzena noslīdēšanu

No cervikālās līdz okluzālai virsmai
konturēta matrica ļauj precīzi
veidot kontaktpunktus

Bez kompromisiem efektivitātē
vai rezultātā: panākta vienkāršāka
un dabiskāka starpproksimālās
anatomijas atjaunošana



Saki
ardievas
ķīlītim



myTines
Prime
flamingo formas

gredzena
uzgalīši
ar integrētu
ķīlīti

sectional
matrix
system



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



jaunums! myQuickmat Prime



Saki
ardievas
ķīlītim

Atsauksme



"myQuickmat Prime ir revolucionārs risinājums, kas ne tikai vienkāršos II klases sānu zobu restaurāciju protokolu, bet arī padarīs visu procesu vieglāku un ātrāku. Pareiza proksimālā kontakta izliekuma iegūšana vienmēr ir bijis izaicinājums II klases restaurācijās, taču, kombinējot jauno Quickmat Prime un myRing Prime, tas nekad nav bijis tik vienkārši vai ekonomiski izdevīgi. Īsāk sakot – īsts spēles mainītājs manām II klases restaurācijām."

Dr. Javier Tapia,
Spānija



Attēli no Dr. Javier Tapia arhīva



for more
information

gredzena uzlikas
ļoti efektīvi formē
matricu proksimāli



flamingo formas

myTines Prime

ķīļveida, vairākkārt lietojamas un
autoklāvējamas myRing Prime
gredzena uzlikas



BILATERĀLI INTEGRĒTI ĶĪLĪŠI



- pašcentrējoši, dabīgai pozīcijai ievietojot
- efektīva blakus esošo zobu separācija
- veiksmīgi veido matricu cervikālajās sienās
- neļauj gredzenam noslīdēt

myRing Prime

nerūsējošā tērauda
seksionālo matricu
gredzens

- ieliekts gredzens,
lai tas netraucētu blakus
esošajiem zobiem



Quickmat Prime


anatomiskās seksionālās
matricas, konturētas no
cervikālās līdz okluzālajai daļai



- precīza kontaktpunkta pozicionēšana
- viena izmēra matrica gan premolāriem, gan molāriem
- centrālā augšējā cilne ērtai pozicionēšanai
- stingra, bet viegli pielāgojama

Quickmat Prime

- dabiski izliekta anatomija
- kontakta punkts
novietots tuvu centram

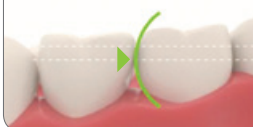

Tradicionālā seksionālā matrica

- "taisna" zoba anatomija
- augsts kontakta punkts



skatīties
video

myQuickmat Prime ir seksionālās matricas sistēma, kas izstrādāta, lai vienkāršotu visas II klases restaurācijas procedūras un samazinātu darbam nepieciešamo laiku.

Ķīlīša izņemšana kā daļa no restaurācijas procesa padara sistēmu vienkāršāku, ātrāku un gudrāku nekā tradicionālās seksionālo matricu sistēmas.

myQuickmat Prime komplekts REF 6890

- 2 gab. – myRing Prime gredzens
- 10 pāri – myTines Prime gredzena uzlikas
- 100 gab. – Quickmat Prime matricas



Papildus iepakojumi

- myRing Prime – REF 6891
2 gab. myRing Prime gredzeni, 4 pāri myTines
- myTines Prime – REF 6892
6 pāri myTines Prime uzlikas
- Quickmat Prime – REF 6893
100 gab. anatomiskās seksionālās matricas



HALOTM

SECTIONAL MATRIX SYSTEM

Skaisti rezultāti īsākā laikā

Vienkārši lietojamā Halo sekcionālā matricu sistēma ļauj īsākā laikā izveidot skaistas, anatomiski precīzi konturētas kompozīta restaurācijas.





NITINOLA GREDZENI

- Superelastīgs nitinola metāls procedūras laikā saglabā pastāvīgu spēku un samazina ciklisko nogurumu
- Gredzeni paredzēti vairāk nekā 1000 lietošanas reizēm
- Ar stikla šķiedru pildītie neilona uzgaļi nelūst un nesabrūk preparācijas zonā, novēršot nepietiekami konturētas restaurācijas
- Gredzena kontūras nostiprina matricu dabiskā un anatomiskā formā, palīdzot novērst pārpalikumu veidošanos un samazinot pulēšanas nepieciešamību
- Gredzena dizains, kas saliekams viens uz otru - ļauj izmantot MOD un citas II klases restaurācijas
- Nodrošina ideālu separāciju blakus esošām restaurācijām



MATRICAS

- Anatomiski veidotas ideālu kontaktpunktu izveidei
- Izliekums marginālās kores zonā nodrošina ideālu okluzālo embrāziju, samazinot pulēšanas nepieciešamību
- Atveres vieglākai pincetei ievietošanai
- Lokāma mēlīte nodrošina ērtu ievietošanu un izņemšanu ar labāku redzamību
- Firm Nonstick matricas ir krāsu kodētas pēc izmēra ērtai identificēšanai
- Original matricas nodrošina lielāku pielāgojamību un pulēšanu, savukārt Firm matricas ir izturīgas pret deformāciju un ideāli piemērotas šaurām interproksimālām zonām



ĶĪLĪŠI

- Stingrs ķīlītis nodrošina aktīvu separāciju, vienlaikus aizsargājot papillu
- Dobais dizains atvieglo ķīlīšu ievietošanu un ļauj tos salikt vienu uz otra, ja nepieciešami vairāki ķīlīši
- Viegli atšķiramas krāsas palīdz identificēt ķīlīšu izmērus
- Saspiežams centrs anatomiskai matricas lentes pielāgošanai



KARUSEĻA DISPENSERS


- Unikāls, viegli lietojams karuseļa tipa dispensers palīdz uzturēt kārtību
- Novērš matricu un ķīlīšu izbēršanos un izklišanu nejaušas nomešanas gadījumā, ietaupot laiku un mazinot neērtības
- Var viegli dezinficēt ar virsmu dezinfekcijas līdzekli

Soli pa solim rokasgrāmata

Skatīt IFU detalizētu lietošanas instrukciju



1. Izvēlieties piemērotu matricu atbilstoši nepieciešamajam okluzāli-gingivālajam augstumam. Izmantojot pinceti, satveriet matricas lenti aiz mēlītes un, ja nepieciešams, to ielieciet un pielāgojiet, pēc tam ievietojiet interproksimāli tā, lai ieliektā virsma būtu vērsta pret restaurējamo zobu.

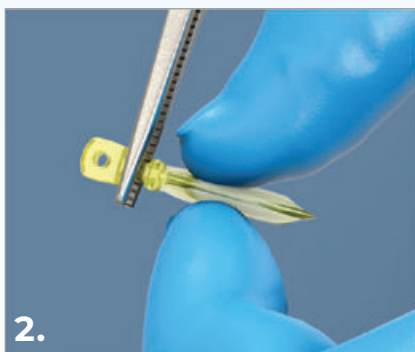


2. Izvēlieties ķīlīti, kas vislabāk pielāgo matricas lenti preparācijas gingivālajai daļai. Satveriet ķīlīti ar pinceti.



3. Var būt nepieciešams ar pirkstu viegli piespiest matricas lenti, lai novērstu tās izkustēšanos ķīlīša ievietošanas laikā.



4. Ja nepieciešams, var izmantot papildu ķīlīti, lai nodrošinātu labāku pielāgošanos gingivālajai kavitātes virsmai.

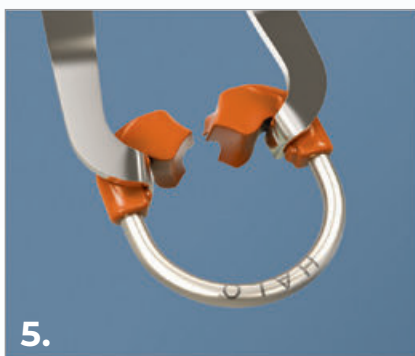

5. Uzmanīgi novietojiet Halo gredzenu, izmantojot gredzena maigles.



6. Gredzens jānovieto pēc iespējas zemāk, lai gredzens atrastos abās zoba pusēs, pārklājot ķīlīti.



7. Pārbaudiet matricas lentes, ķīlīša un gredzena novietojumu, lai pārlicinātos, ka matricas lente ir labi pielāgota kavitātes virsmu robežām un cieši saskaras ar blakus esošo zobu.

Produktu saraksts

Komplekti, rezerves uzpildes un instrumenti



4831 - Halo Sekcionālās matricas sistēma Original Bands ar instrumentu komplektu

2 x *Universal Gredzeni*
25 x *Original Matricas*
3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm un 7.5 mm
25 x *ķīliši Mazi, Vidēji un Lieli*
1 x Halo Carousel
1 x Pincete
1 x Maigles

4832 - Halo Sekcionālās matricas sistēma Original Bands Komplekts

2 x *Universal Gredzeni*
25 x *Original Matricas*
3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm un 7.5 mm
25 x *ķīliši Mazi, Vidēji un Lieli*
1 x Halo Carousel

4835 - Halo Sekcionālās matricas sistēma Original Bands Mini Komplekts

2 x *Universal Gredzeni*
5 x *Original Matricas*
3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm un 7.5 mm
5 x *ķīliši Mazi, Vidēji un Lieli*
1 x Halo Carousel

4833 - Halo Sekcionālās matricas sistēma Firm Nonstick Bands Komplekts

2 x *Universal Gredzeni*
20 x *Firm Matricas*
3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm un 7.5 mm
25 x *ķīliši Mazi, Vidēji un Lieli*
1 x Halo Carousel

4834 - Halo Sekcionālās matricas sistēma Firm Bands Komplekts

2 x *Universal Gredzeni*
25 x *Firm Matricas*
3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm un 7.5 mm
25 x *ķīliši Mazi, Vidēji un Lieli*
1 x Halo Carousel

5048 - Halo Pincete **1 gab.**

5047 - Halo maigles **1 gab.**

Halo ķīliši

Izmērs	100 gab.
Mazs	5042
Vidējs	5043
Liels	5044



Halo Original Matricas

Izmērs	50 gab.	100 gab.
3.5 mm	5448	5449
4.5 mm	5450	5451
5.5 mm	5452	5453
6.5 mm	5454	5455
7.5 mm	5456	5457

Halo Firm Matricas

Izmērs	50 gab.	100 gab.
3.5 mm	5059	—
4.5 mm	5062	5063
5.5 mm	5064	5065
6.5 mm	5066	5067
7.5 mm	5068	—

Halo Firm Nonstick Matricas

Izmērs	50 gab.	100 gab.
3.5 mm	5049	—
4.5 mm	5051	5052
5.5 mm	5053	5054
6.5 mm	5055	5056
7.5 mm	5057	—

Halo Universal Gredzeni

Izmērs	1 gab.	2 gab.
Universal	5008	5009

Teicami kontakti garantēti

Garrison

Dental Solutions



Garrison sekcionālo matricu sistēma četrpadsmito reizi pēc kārtas ieguvusi Dental Advisor balvu kategorijā "Labākā sekcionālā matrica"!



The Dental Advisor – Labākā sekcionālā matricu sistēma 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā, kā arī Editors' Choice.

STRATA-G™

SG Gredzeni

Strata-G™

Īsiem un nepareizi novietotiem zobiem

Lieliem molāriem

Lielām kavitātēm un kad trūkst paugurs

Papildiepakojums
Artikuls Daudzums

Gredzeni II klases kavitātēm



SG400
4,7 mm



SG500
6,4 mm



SG600
wide prep



SGR01
Trīspaka, pa 1 gredzenam no katra veida

Augstums

Artikuls	Daudzums
SG400	2
SG500	2
SG600	2
SG400-1	1
SG500-1	1
SG600-1	1
SGR01	3

Composi-Tight® 3DFusion™

FX Gredzeni

Composi-Tight® 3D Fusion™

Īsiem un nepareizi novietotiem zobiem

Lieliem molāriem

Lielām kavitātēm un kad trūkst paugurs

Papildiepakojums
Artikuls Daudzums

Gredzeni II klases kavitātēm



FX400
4,7 mm



FX500
6,4 mm



FX600
wide prep



FXR01
Trīspaka, pa 1 gredzenam no katra veida

Augstums

Artikuls	Daudzums
FX400	2
FX500	2
FX600	2
FX400-1	1
FX500-1	1
FX600-1	1
FXR01	3

Composi-Tight® 3D XR

3D Gredzeni

Composi-Tight® 3D XR™

Īsiem un nepareizi novietotiem zobiem

Lieliem molāriem

Papildiepakojums
Artikuls Daudzums

Gredzeni II klases kavitātēm



3DXR
4,7 mm



3D500
6,4 mm


Augstums

Artikuls	Daudzums
3DXR	2
3D500	2
3DXR-1	1
3D500-1	1

Fusion™ Anterior

III un IV klases restaurācijām

Fusion™ Anterior matricu sistēma no Garrison® piedāvā materiālus un tehniku, lai ar pārliecību veiktu dažādu veidu priekšzobu restaurācijas.

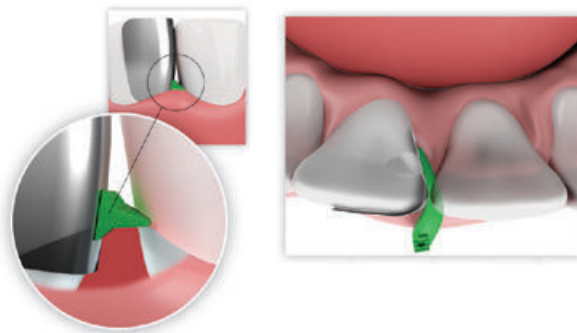

Priekšzobu ķīliņi

Fusion™ Anterior						
III un V klases kavitātēm						
Part. Nr.	ANYL	ANBL	ANOR	ANGR	ANK4	ANK4-M
Apraksts	Ļoti mazi, dzelteni	Mazi, zili	Vidēji, oranži	Lieli, zaļi	Ķīliņu komplekts, 400 gab. – katra krāsa 100 gab. 4 izmēros	Ķīliņu komplekts, 200 gab. – katra krāsa 50 gab. 4 izmēros
Daudzums	100	100	100	100	400	200

Fusion™ Anterior Matrix System

Fusion™ Anterior Matrix piedāvā virkni uzlabojumu, kas palīdz ātri un pārliecinoši atjaunot ideālu interproksimālo anatomiju.



Fusion Anterior matricas

Veids	Artikuls	Standarta iepakojums	Artikuls	Lielais iepakojums
Īsas	AN100-M	50 gab.	AN100	100 gab.
Garas	AN200-M	50 gab.	AN200	100 gab.


- Tikai 0.0015" – ievērojami plānākas par lentītēm, kas nodrošina labāku interproksimālo kontaktu.
- Stingrs nerūsējošais tērauds saglabā formu gan ievietošanas laikā, gan ievietojot kompozītu kavitātē.
- Viegli ievietojamas sulkusā dziļākiem restaurācijas gadījumiem.
- Ideāls anatomiskais izliekums gan gingivāli-incizālā, gan bukāli-lingvālā virzienā.
- Daudz efektīvākas nekā lentītes lielu vai dziļu kariozu bojājumu atjaunošanā.



Malas celšanas matricas:

Malas celšanas matricas nodrošina optimālu piekļaušanos smaganu malai un kontūru dziļi novietotām marginālajām zonām.

Tās augstums ir samazināts, lai veicinātu uzlabotu piekļaušanos dziļām zonām.

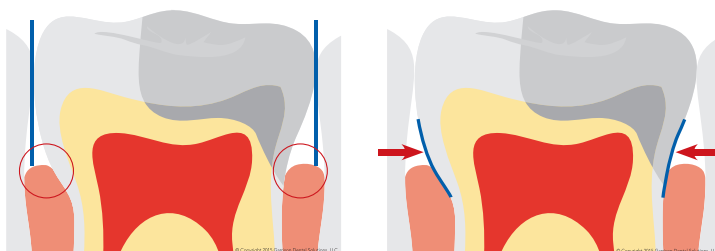

Klasiska Tofflemire matrica

Malas celšanas matrica



Dr. Roberts Rozenfelds (Vestvuda, Ņūdžersija)
izmanto malas celšanas matricu
no Garrison® Dental Solutions

SlickBands™



Klīniskie gadījumi



1.attēls: Amalgamas izņemšana;
kariozais process ir izplatījies dziļi
subgingivāli gan mesīāli, gan distāli.



2. attēls: Praimera un saites uzklāšana,
pakāpeniski ievieto restaurāciju materiālu.



3. attēls: Malas celšanas matricas
un ķīliša ievietošana.



4. attēls: Malas celšanas matricas noņemšana,
pēc tam sekcionālās matricas, ķīliša un
separācijas gredzena ievietošana
mesiālajā pusē.



5. attēls: Malas celšanas matricas noņemšana,
pēc tam sekcionālās matricas, ķīliša un
separācijas gredzena ievietošana
mesiālajā pusē.



6. attēls: Gatava restaurācija.



Dr. Klarensa Tama (Oklenda, Jaunzēlande)
izmanto Fusion™ priekšzobu matricu sistēmu
no Garrison® Dental Solutions.

Fusion Anterior™

III un IV klases restaurācijām



1. attēls: Sākotnējā situācija.



2. attēls: Fusion™ priekšzobu matricas un
Fusion™ izliekta priekšzobu starpzobu ķīliša
ievietošana nodrošina minimālu restaurācijas
materiāla pārkari.




3. un 4. attēls: Abi restaurāciju
veidošana.



5. attēls: Gatava restaurācija.

Garrison®
Dental Solutions

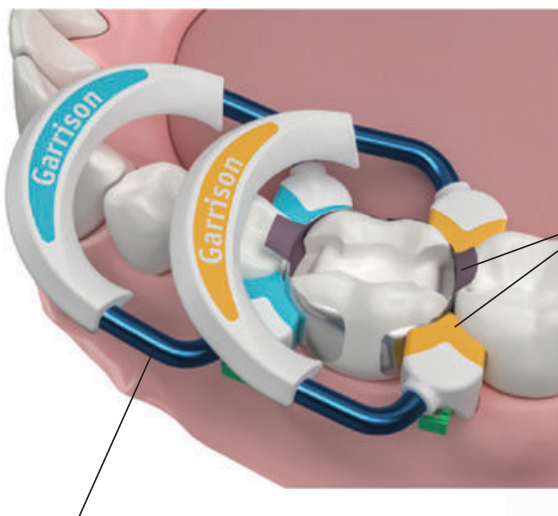

Tagad vēl ātrāk un paredzamāk!

Uzlabota kontūru veidošana

ar precīzi pielāgotu aproksimālo anatomiju
Uzlabojumi matricu lentēs un gredzenos ļauj
vienkāršāk veidot estētisku un paredzamu
rezultātu – katrā restaurācijā.

Uzticami, cieši kontakti

Gredzeni no niķeļa-titāna sakausējuma un PEEK materiāla nodrošina noturīgu zoba separācijas spēku ilgāk! Īpaši izturīgais PEEK palielina zoba separācijas spēku un pagarina gredzenu kalpošanas laiku.



Īsi un nepareizi
novietoti zobi

Artikuls: SG400
(2 gredzeni/iepakojumā)



Lieli molāri

Artikuls: SG500
(2 gredzeni/iepakojumā)



Plašas preparācijas
un trūkstoši pauguri



Artikuls: SG600
(2 gredzeni/iepakojumā)

**Strata-G™ veido 270° hermētisku noslēgumu
optimālai materiāla pārpalikumu kontrolei**

Ātrākas un mazāk apgrūtināšas II klases restaurācijas

Strata-G™ gredzeni, matricas un ķīļi apvienojas, veidojot 270° Seal™ hermētisku loku, kas nodrošina izcilu materiāla pārpalikumu kontroli un precizitāti.

Gredzeni 'nenoleks' no zoba, pateicoties retencijas uzgaļiem, un iespaidīgais zaļais Wide preparation gredzens, paredzēts plašām preparācijām, padara pat sarežģītus klīniskos gadījumus viegli izpildāmus.

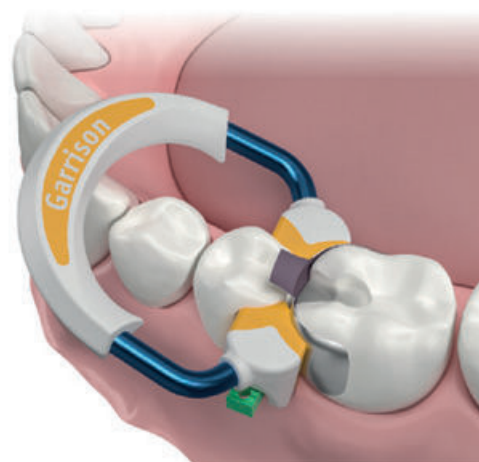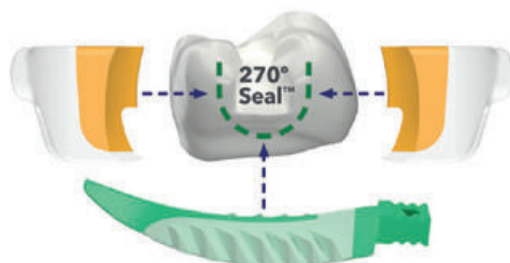

Plašāki pielietojums - platāks smaids!

Zaļais gredzens – zobārstniecībā vadošais risinājums lielām kavitātēm – padara Strata-G™ par visdaudzpusīgāko un lietotājam draudzīgāko sistēmu tirgū. Ar pārlicību risiniet pat vissarežģītākos sānu zobu restaurācijas gadījumus, sasniedzot izcilu kontaktu un kontūru.

Sekcionālie matricu ķīļi


Pateicoties dizainam - labāka piekļaušanās

Apgrieztā V veida forma iegul zemāk un nodrošina dziļāku noslēgumu starpzobu kontaktā, kamēr elastīgās sānu sienas un Soft-Face™ TPE pārklājums ļauj Strata-G™ ķīļiem viegli pielāgoties padziļinājumiem un nelīdzenumiem.



Saudzīgs pret papillu

Gludais tuneļa dizains un noapaļotās malas viegli slīd pāri papillai, radot mazāku traumu

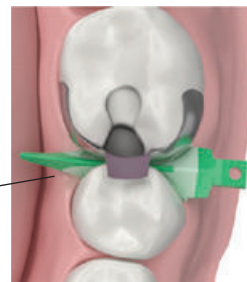

Strata-G™ ķīļi

Ķīļi II klases kavitātēm

Apraksts
Part. Nr.
Daudzums



Mazs, dzeltens
SGYL
100 gab.



Vidējs, zils
SGBL
100 gab.



Liels, oranžs
SGOR
100 gab.



Īpaši liels, zaļš
SGGR
100 gab.

Vairāku ķīļu izmantošana vienlaikus

Gludais tunelveida dizains ļauj ērti ievietot vairākus ķīļus vienu virs otra. Šī īpašība ir īpaši noderīga gadījumos ar smaganu recesiju vai ja nepieciešama vienlaicīga ķīļu ievietošana no bukālās un lingvālās puses.




Sekcionālās matricas

Apraksts	Zobu restaurācijām bērniem	Prēmolāriem	Prēmolāriem un mazajiem molāriem	Molāriem	Molāriem ar dziļām cervikālām preparācijām
Strata-G™ nelīpošās matricu lentes					
0,038 mm biezas					
Augstums Part. Nr. Daudzums	3,5 mm SG050 100 gab.	4,5 mm SG100 100 gab.	5,5 mm SG175 100 gab.	6,5 mm SG200 100 gab.	7,5 mm SG300 100 gab.

Optimāla piekļuve un forma

Strata-G™ lentes nodrošina vadību un formu II klases restaurāciju marginālās grēdas izveidei, vienlaikus netraucējot piekļuvi restaurējamajai zonai.

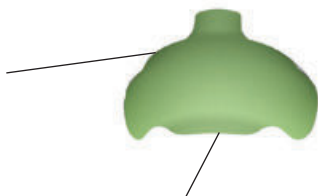


ProfileBooster™ subgingivālais "priekšauts"

Integrēta funkcija, kas palīdz veidot dabisku emerdžences profilu grūti pieejamās cervikālajās zonās, nodrošinot labāku anatomiju subgingivāli.

Viegla matricu noņemšana

Pateicoties nelīpošajam pārklājumam, samazināta kompozīta adhēzija līdz pat 92%, kas atvieglo matricu izņemšanu pēc restaurācijas.

Uzlabota malas forma
Nostiprināts iepriekšējais kontūrējums
okluzālajā daļā ļauj precīzāk atjaunot anatomiski korektu malu.

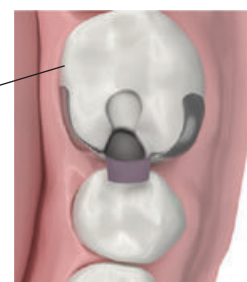


TOP DENT

Restaurācijām

Top Dent konturētas matricas

Konturētas 0,045 mm nerūsējošā tērauda matricu lentes

	Art. nr.
0 Divpusēja premolāra matrica - 50 gab.	Kerr ref. 390/ 604 209
1 Divpusēja molāra matrica - 50 gab.	Kerr ref. 391/ 604 210
2 Vienpusēja premolāra matrica ar distālu izvirzījumu, ar mežiālu izliekumu - 50 gab.	Kerr ref. 392/ 604 211
3 Vienpusēja premolāra matrica ar mežiālu izvirzījumu, ar distālu izliekumu - 50 gab.	Kerr ref. 393/ 604 212
4 Vienpusēja molāra matrica ar distālu izvirzījumu, ar mežiālu izliekumu - 50 gab.	Kerr ref. 394/ 604 213
5 Vienpusēja molāra matrica ar mežiālu izvirzījumu, ar distālu izliekumu - 50 gab.	Kerr ref. 395/ 604 214

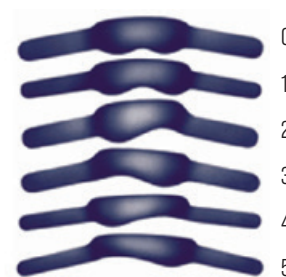

Cena 42,46 € ar PVN

Top Dent matricas

Plānas, 0,038 mm

	Art. nr.
P1 Taisna premolāra matrica - 100 gab.	604 200
P2 Vienpusēja premolāra matrica - 100 gab.	604 201
P3 Divpusēja premolāra matrica - 100 gab.	604 202
P4 Divpusēja premolāra matrica (augsta) - 100 gab.	604 203
M1 Taisna molāra matrica - 100 gab.	604 204
M2 Vienpusēja molāra matrica - 100 gab.	604 205
M3 Divpusēja molāra matrica - 100 gab.	604 206



Cena 13,10 € ar PVN

Top Dent Tofflemire matricas

Konturēta matricas lente no nerūsējošā tērauda

	Art. nr.
Tofflemire 0,038 mm - 30 gab.	Kerr ref. 1101C/ 604 208
Tofflemire 0,05 mm - 30 gab.	Kerr ref. 1001C/ 861 052



Cena 16,99 € (0,038 mm) un
22,14 € (0,05 mm) ar PVN



Cena 40,29 €
ar PVN



Cena 16,86 € un 17,70 €
ar PVN

Top Dent ķīļiši

Krāsu kodēti, 13 mm

	Art. nr.
Nr.1 oranži - 400 gab.	602 741
Nr.2 balti - 400 gab.	602 742
Nr.3 zaļi - 400 gab.	602 743
Nr.4 dzeltenī - 400 gab.	602 744
Nr.1-4 assorti - 400 gab.	602 740

	Cena ar PVN	Art. nr.
Nr. 0.5 tirkīza 100 gab. Kerr 822/05	17,70 €	LD 602778
Nr.1-4 assorti 100 gab. Kerr 823	16,86 €	LD 602774
Nr.1 oranži 100 gab. Kerr 822/10	17,70 €	LD 602777
Nr.2 balti 100 gab. Kerr 822/20	17,70 €	LD 602775
Nr.3 zaļi 100 gab. Kerr 822/30	17,70 €	LD 602776
Nr.4 dzeltenī 100 gab. Kerr 822/40	16,86 €	LD 602770
Nr.5 zili 100 gab. Kerr 822/50	16,86 €	LD 602771
Nr.6 sarkani 100 gab. Kerr 822/60	16,86 €	LD 602772

Top Dent Strips

Abrazīvās lentītes ar alumīnija oksīda pārklājumu vienā pusē. Divas abrazivitātes pakāpes uz vienas lentītes. Paredzētas konturēšanai, pulēšanai un augsta spīduma iegūšanai.

	Art. nr.
Coarse - Medium - 50 gab.	619 110
Fine - Ultrafine - 50 gab.	619 111

Cena 7,20 €
ar PVN

SIMPLEE matricu sistēma

SIMPLEE matricu sistēma sastāv no – gredzena ar izturīgu plastmasas stiprinājumu, apaļa kāja ar noņemamām “pēdītēm” (Delta Tubes) no silikona, lai nodrošinātu optimālu pielāgošanos izliekumam.

Matricas ovāli profilēta forma no nerūsējošā tērauda, biezums – 0.04mm.

SIMPLEE matricu sistēmas komplekts

Komplektā 2 NiTi gredzeni, 6 silikona uzgaļi - “pēdīņas” (Delta Tubes), 40gab. premolāru matricas, 40gab. molāru matricas un 20gab. molāru matricas ar “vēderiņu” (w/tongue).

REF 604440

Fiksēta zema cena:

100.00 EUR

**SIMPLEE NiTi matricu gredzens, 2gab. +
6 silikona uzgaļi**

REF 604444

Fiksēta zema cena:

50.00 EUR

SIMPLEE matricas

Molāru, 50gab. – 604441

Premolāru, 50gab. – 604442

Fiksēta zema cena:

16.00 EUR

Molāru ar “vēderiņu” (w/tongue), 25gab. – 604443

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR

SIMPLEE koka ķīliši

Ar krāsu kodēti anatomiskie koka ķīliši.

Iepakojumā – 100gab.

Rozā 11mm – 602737

Zili 12mm – 602738

Zaļi 13mm – 602739

Fiksēta zema cena:

6.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**



604441



604442




604443



dab

Video lekciju platforma

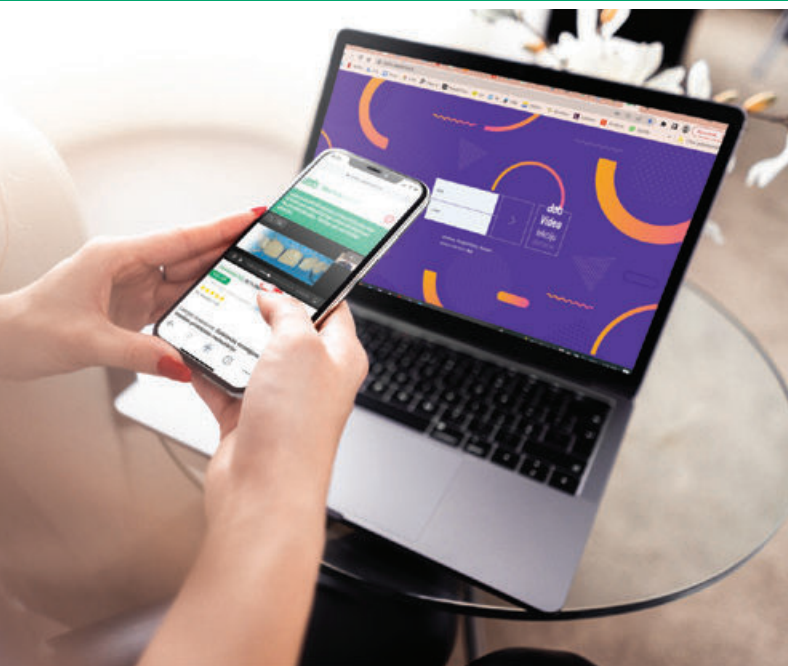

Izvēlies lekciju ierakstus
un ievadot **promo kodu**

DABZURNALS

saņem **25 %** atlaidi

Promo kods spēkā līdz 1. jūnijam 2026

Noskenē un ienāc
Video platformā!



video.dabdental.lv

Jauniem lietotājiem - ja vēl nav sava profila!
Izvēlies. Reģistrējies. Saņem pieejas lekcijām.



mitto.me/video-lekcijas



Jautājumu gadījumā -
lūdzu, konsultēties ar mūsu komandu!
Priecāsimies palīdzēt!

Sintija **29 419 005**
Lāsma **26 224 463**
Ilgvars **26 403 453**
Juris **29 356 655**

Info tālr. **20 028 899**
Bezmaksas līnija **80 200 933**

Birojs un noliktava – Ulbrokas iela 34, Rīga